

Jednostavan i brz način za dijeljenje svojih rezultata glukoze u krvi s vašim liječnikom

Postanite korisnik aplikacije CONTOUR®DIABETES i na daljinu se povežite sa svojim liječnikom*

1

Preuzmite aplikaciju CONTOUR®DIABETES



Besplatno preuzimanje




Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Popis kompatibilnih uređaja potražite na compatibility.contourone.com

2

Izradite račun

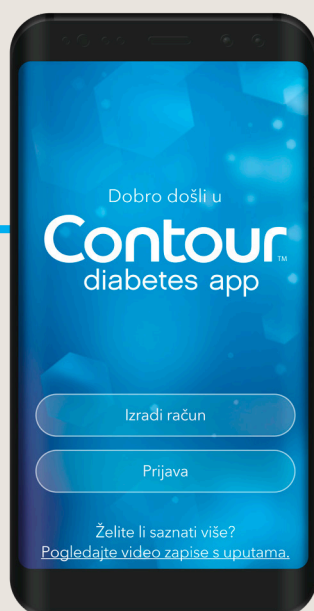

3

Uparite svoj kompatibilni glukometar CONTOUR®



Za više informacija posjetite:
diabetes.ascensia.com


*Trebate biti registrirani na GlucoContro.online i odobriti dijeljenje svojih podataka s liječnikom

Jednostavno uključivanje za mogućnost dijeljenja glukoze u krvi s vašim liječnikom na daljinu

Pričekajte pozivnicu svog liječnika

Pozivnica putem e-pošte

Primiti pozivnicu putem e-pošte i kliknite na poveznicu*

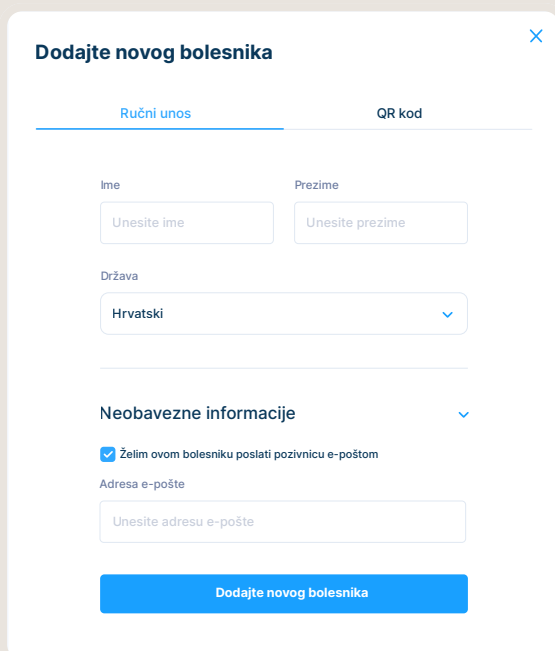

Dodajte novog bolesnika

Ručni unos **QR kod**

Ime:

Prezime:

Država:

Neobavezne informacije

☒ Želim ovom bolesniku poslati pozivnicu e-poštom

Adresa e-pošte:

Dodajte novog bolesnika

*Liječnik šalje pozivnicu



Korisnička podrška
MEDILAB ONE:
0800 600 900
dijabetes@medilabOne.com

ili


Pozivnica putem QR koda

1 Skenirajte QR kod generiran tijekom posjeta



Dodajte novog bolesnika

Ručni unos **QR kod**

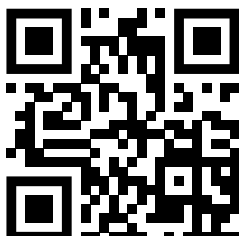

2

Prijavite se sa svojim korisničkim imenom i lozinkom za aplikaciju CONTOUR®DIABETES



Korisnik **Zdravstveni djelatnik**

Contour Partnering with you Za prijavu na svoj račun koristite podatke za Contour Cloud.

Adresa e-pošte:

Lozinka: [Zaboravili ste lozinku?](#)

☐ Zapamti me

Prijava Nimate korisnički račun? [Registrij se](#)

3

Unesite svoje podatke



Sada su vaši podaci o glukozi u krvi dostupni vašem liječniku putem GlucoContro.online