



90010339


Rev. 05/22



6572A

Namjena: MICROLET® lanceta jednokratni je sterilni medicinski proizvod namijenjen za uzimanje uzorka kapilarne krvi kod odraslih ljudi ili djece u svrhu mjerenja glukoze. Lanceta nije namijenjena za neonatalnu uporabu. • **Namen uporabe:** Lanceta MICROLET® je sterilni pripomoček za enkratno uporabo, namenjen jemanju vzorca kapilarne krvi odraslega ali otroka za spremljanje glukoze. Lanceta ni primerna za uporabo v neonatologiji. • **Prooričljiva uporaba:** H βελόνα MICROLET® είναι μια αποστειρωμένη συσκευή μιας χρήσης, η οποία προορίζεται για τη λήψη δείγματος τριχοειδικού αίματος από ενήλικο ή ανήλικο άτομο για παρακολούθηση της γλυκόζης αίματος. Η βελόνα δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά.

Upute: / Navodila: / Οδηγίες:
Pogledajte upute isporučene s vašim lancetom za izvođenje testiranja iz jagodice prsta te za dodatne informacije o sigurnosti i radu. • **Glejte** navodila, ki so priložena vaši sprožilni napravi, za izvedbo merjenja z odvzemom iz blazinice prsta ter za dodatne informacije o varnosti in učinkovitosti. • **Ανατρέξτε** στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή τρυπήματος για να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση στο ακροδάκτυλο, αλλά και για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας και απόδοσης.

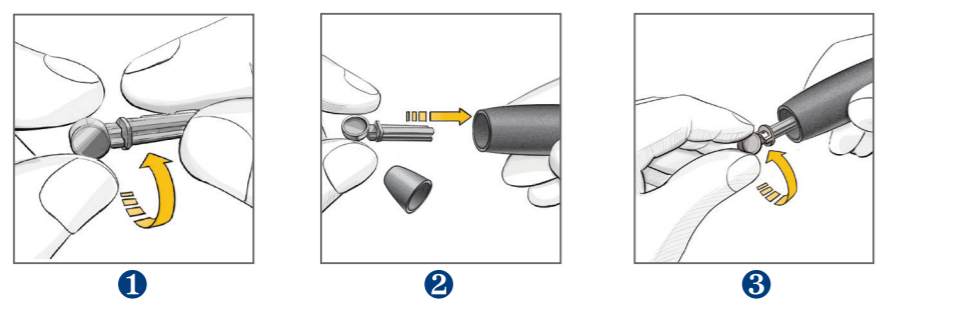

Microlet
 Lancete u boji • Barvne lancete • Χρωματιστές βελόνες

REF 84505634

STERILE

- Ne uporabljajte ako je pakiranje oštećeno
- Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
- Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
- Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana

Lanceta je sterilna dok se ne ukloni zaštitna kapica. Ne uporabljajte ako je pakiranje oštećeno ili slučajno otvorena. Uvijek odložite kao medicinski otpad. Lanceta ostane sterilna, dokler se zaštitni pokrovček ne odstrani. Ne uporabljajte, če je poškodovana ali nenamerno odprta. Vedno jo zavrzite kot medicinski odpad. H βελόνα παραμένει αποστειρωμένη έως ότου αφαιρεθεί το προστατευτικό καπάκι. Να μη χρησιμοποιηθεί αν έχει καταστραφεί ή ανοιχτεί ακούσια. Απορρίψτε πάντα ως ιατρικό απόβλητο.

Microlet
 Lancete u boji • Barvne lancete • Χρωματιστές βελόνες

Jednostavno, nježno testiranje
 Preprost in blag odvzem
 Ευκόλη, ανώδυνη διαδικασία

HR Za uporabu s lancetarima iz obitelji MICROLET®.
SL • Uporaba z družino sprožilnih naprav MICROLET®.
EL • Για χρήση με τη σειρά συσκευών τρυπήματος MICROLET®.

Uvozi i distribuira:
 MEDILAB ONE d.o.o.
 Hondlova 2/11
 10 000 Zagreb
 Republika Hrvatska
 Tel: +385 1 2356 730
 Besplatni tel: 0800 600 900
 Faks: +385 1 2358 001
 diabetes@medilabOne.com
 www.medilabOne.com

Uvažava in distribuira:
 Zaloker & Zaloker d.o.o.
 Kajuhova ulica 9
 1000 Ljubljana
 Slovenija
 Tel.: 01 542 51 11
 info@zaloker-zaloker.si
 Εισαγωγή και διανομή από:
 Ascensia Diabetes Care Ελλάς ΑΕ
 Ακρω. Βουλιαγμένης 114
 166 74 – Γλυφάδα
 Αττική, Ελλάδα
 +30 214 1000 900 (Κεντρικό)
 +30 214 1000 999 (Εξυπηρέτηση Πελατών)
 diabetescare.gr@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.com
 Proizvedeno u Poljskoj. • Izdelano na Poljskem. • Κατασκευάστηκε στην Πολωνία.
 Ako se tijekom uporabe ovog proizvoda ili kao posljedica njegove uporabe dogodi ozbiljan štetni događaj, prijavite ga proizvođaču ili ovlaštenom predstavniku i nadležnom nacionalnom tijelu. • Če je med uporabo tega pripomočka ali kot posledica njegove uporabe prišlo do resnega zapleta, to prijavite proizvajalcu in/ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku ter svojemu nacionalnemu organu. • Εάν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της χρήσης της εν λόγω συσκευής ή ως συνέπεια της χρήσης της, θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και στην εθνική σας αρχή.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
 Peter Merz-Strasse 90
 4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
 Via Varese, 162
 20156 Milano, Italy

Medicinski proizvod
 Medicinski pripomoček
 Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Ograničenje vlažnosti
 Omejeitev vlažnosti
 Περιορισμός υγρασίας

ASCENSIA
 Diabetes Care

CE 2797

© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Sva prava pridržana.
 • Vse pravice pridržane. • Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
 Za informacije o patentima i povezanim licencijama posjetite www.patents.ascensia.com.
 • Za informacije o patentih in povezanih licencah glejte www.patents.ascensia.com.
 • Για πληροφορίες σχετικά με τα δηλωμένα ευρεσιτεχνία και τις σχετικές άδειες χρήσης, βλ. www.patents.ascensia.com.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care i Microlet zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
 • Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care in Microlet so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
 • To Ascensia, to logo Ascensia Diabetes Care και το Microlet είναι εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

